







Gebrauchs- und Pflegehinweise

Vor dem ersten Tragen bei 90°C in der Waschmaschine waschen.

So legen Sie die Mund-Nasen-Maske am besten an:

-  Hände nach bekanntem Standard gründlich waschen
(weitere Informationen finden Sie auf www.infektionsschutz.de)
-  Maske mit Nasenbügel oben über der Nase anlegen
-  obere Bänder am Hinterkopf oben binden
(bei der Ausführung mit elastischem Band wird dieser an selber Stelle angelegt)
-  untere Bänder im Nacken binden
-  Nasenbügel mit zwei Fingern an modellieren
-  fertig :) Maske möglichst nicht mehr anfassen

Weitere Hinweise:

Bei jedem Kontakt mit der Maske, anlegen, abnehmen, modellieren, immer die Hände waschen. Vermeiden Sie es, den Nasenbügel oft und stark zu knicken, da dieser auf Dauer brechen könnte. Laut Empfehlung der WHO und des Robert-Koch-Instituts muss jede Mund-Nasen-Maske nach Durchfeuchtung (z. B. nach vielem Sprechen) gewechselt werden. Die Maske wird in Deutschland gefertigt und ist mindestens 50 Mal bei maximal 95°C Grad waschbar.

Wichtig: Trotz Tragens einer Mund-Nasen-Maske bleiben die allgemeinen Hygienemaßnahmen wie z. B. häufiges Händewaschen, Abstand halten, Hust- und Nießhygiene unverzichtbar!

Materialzusammensetzung:

50% Polyester / 50% Lyocell (TENCEL™)

Lyocell ist eine Cellulosefaser aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Die Lyocell-Faser der Marke TENCEL™ ist bekannt für ihre sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und Reinheit. Letztere spielt insbesondere im medizinischen Sektor eine wichtige Rolle. Durch die Kombination aus Polyester und Lyocell (TENCEL™) wird der Feuchtigkeitstransport vom Körper reguliert, sodass die Maske schneller trocknet als vergleichbare Produkte aus 100% Baumwolle.

Wichtige Informationen zu Ihrer Mund-Nasen-Maske:

Die Mund-Nasen-Maske ist weder ein Medizinprodukt, noch der PSA-Verordnung untergeordnet. Es handelt sich nicht um eine partikelfiltrierende Halbmaske (FFP), welche vor Aerosolen schützt.

Da es sich bei diesem Artikel um einen **Hygieneartikel** handelt, sind **Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen**.

Die Mund-Nasen-Maske dient dazu, die Abgabe von Speicheltröpfchen durch den Maskenträger an die Umwelt zu minimieren und kann dazu beitragen, dass eventuell kontaminierte Hände den Mund-Nase-Bereich des Trägers nicht direkt berühren.

Wussten Sie auch? Laut Empfehlung der Referentin Schadstoffmanagement & Ökologie des German Fashion Modeverband Deutschland e.V., Frau Dr. Monika Kohla, welche auch gleichzeitig das Bundesgesundheitsministerium berät, wird von reinen Baumwollmasken (100% Baumwollanteil) abgeraten, da Baumwolle zu schnell durchfeuchtet und dadurch die Durchlässigkeit einer Maske erhöht. Viel besser seien hingegen Masken aus Synthetik- & Naturfasermischungen.

Vertrieb an öffentliche Einrichtungen und Unternehmen:

4BUSINESS WERBEMITTEL & VERTRIEBS GMBH
LETTENBACHSTRASSE 1
D - 86874 MATTSIES

P: 00 49 (0) 8268 / 90880 - 100

W: [HTTPS://WWW.4BUSINESS-WERBEARTIKEL.DE](https://www.4business-werbeartikel.de)
M: VERTRIEB@4BUSINESS-GMBH.DE