

# INTELLIGENT TEMPERATURE TEST

## FIEBERMESSSTATION / KÖRPERTEMPERATURERKENNUNG IN ZENTIGRADEN

<b>FARBE GRÜN</b>	<b>32,0°C - 37,0°C</b>
<b>FARBE GELB</b>	<b>37,1°C - 37,5°C</b>
<b>FARBE ROT</b>	<b>37,6°C - 40,0°C</b>

### EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das ITT-GERÄT zur Messung der Körpertemperatur entschieden haben. Dieses Gerät ist für die Verwendung an einer einzelnen Person an einem festen Standort oder in einem Durchgang, zur vorbeugenden Überwachung der Körpertemperatur vorgesehen.

### ANMERKUNGEN ZUR MESSUNG

Stellen Sie das Gerät in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur zwischen 19 und 25 °C an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen auf. Ein Unterschied in der Umgebungstemperatur, der niedriger oder höher als der angegebene ist, beeinträchtigt die korrekte Anzeige der Körpertemperatur. Bei Erkennung zu niedriger Temperaturen erscheint das Wort „LOW“ auf dem Display. Bei Erkennung zu hoher Temperaturen erscheint das Wort „ERR“ auf dem Display. Das Gerät liest aus einer Entfernung von 50 cm. Das Messen mit einem Gesicht, das durch Quellen und externe Mittel erhitzt wurde, mit Cremes bedeckt ist, mit einer Brille oder einem bedeckten Gesicht, beeinträchtigt das Lesen. Das Gerät ist bei abnormalen Temperaturen mit einem akustischen Signal ausgestattet. Es bleibt jedoch ein Instrument, das nicht für medizinische Zwecke bestimmt ist. Bei 3 Messwerten über 37,5° Celsius wird eine Überprüfung mit einem Kontakttermometer für medizinische Zwecke empfohlen.

### DATENSCHUTZ

Zum Schutz der Privatsphäre zeigt das Gerät die Werte der erfassten Temperaturen in 3 verschiedenen Farben an:  
GRÜNE FARBE Temperatur gemessen zwischen 32° und 37°  
GELBE FARBE Temperatur gemessen zwischen 37,1° und 37,5°  
ROTE FARBE Temperatur zwischen 37,6° und 40° erkannt

- Keine Umtausch
- Solange der Vorrat reicht
- Bestellungen auf Anfrage
- Vorauszahlung
- Lieferzeit 10-15 Tage



**MADE  
IN  
ITALY**

**ART. WT1010**

**All flash**  
Produktions+Vertriebs GmbH

Allflash Produktions + Vertriebs GmbH  
Lettenbachstraße 1 • 86874 Mattsies  
Tel. +49 (0) 82 68 / 90 880 -300  
fax +49 (0) 82 68 / 90 880 -399  
info@allflash.de • [www.allflash.de](http://www.allflash.de)

## INSTALLATION

- » Packen Sie die Verpackung aus und achten Sie auf die darin enthaltenen Komponenten
- » Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage des Sockels
- » Nicht in der Nähe von Wärmequellen, Klimaanlage oder in der Sonne aufstellen
- » Stellen Sie sicher, dass die Befestigung am Boden oder an der Wand stabil ist
- » Stecken Sie den 5-Volt-Stecker ein
- » Stecken Sie den Stecker in eine 110/220-50-Hz-Buchse
- » Warten Sie einige Sekunden, bis der Bildschirm grün wird
- » Um zuverlässigere Messungen zu erhalten, wird empfohlen, nach dem Einschalten 30 Minuten zu warten, bis sich die Sensoren an die Temperatur der Umgebung angepasst haben, in der das Gerät installiert wurde

## STROMVERSORGUNG

5 volt enthalten

### GRÖSSE

cm 180 x 50 x 30

### GEWICHT

Kg7,5

