

KND-003 FFP2 NR - Atemschutzmaske

Zertifikat + EU-Konformitätserklärung einsehbar unter:

<https://psa.attgermany.com/wp-content/uploads/2020/11/15038-CE2163-Zertifikat-Anweisung.pdf>

Anwendungen:

Filternde Halbmasken der Kategorie FFP2 haben die Zweckbestimmung, den Träger der Maske vor festen und flüssigen Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen. Unsere Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009. Sie hat die Leistungsprüfungen auf Filterdurchlass, Entflammbarkeit, Atemwiderstand und Gesamtleckage nach innen erfolgreich durchlaufen und entspricht der Schutzklasse FFP2.

Dichtungstest:

1. Bedecken Sie die Maske vorsichtig mit beiden Händen, ohne den Dichtsitz zu verändern. 2. stark Ausatmen; 3. Bei einer Leckage im Nasenbereich, den Nasenbügel neu anpassen. Dichtsitzprüfung wiederholen. 4. Bei einer Leckage am Maskenrand, den Sitz der Bänder überprüfen und anpassen. Dichtsitzprüfung wiederholen.

Sicherheitshinweise:

- Tragen Sie die Atemschutzmaske ununterbrochen, solange Sie Verschmutzungen ausgesetzt sind.
- Wechseln Sie die Atemschutzmaske unbedingt gegen eine neue,
 - wenn die Atemschutzmaske während des Aufenthalts in einem verschmutzten Raum entfernt wurde;
 - wenn die Atemschutzmaske so verschmutzt ist, dass Sie Atemschwierigkeiten bekommen;
 - wenn die Atemschutzmaske beschädigt wird.
- Verlassen Sie den verschmutzten Bereich sofort, wenn Schwindel, Übelkeit oder andere Beschwerden auftreten.
- Beachten Sie, dass die Dichtigkeit und damit die Funktion der Maske durch einen Bart oder Bartstoppeln beeinträchtigt werden kann.
- Wenn Sie KEINEN richtigen Dichtsitz erreichen können, betreten Sie NICHT den Gefahrenbereich.



Die Atemschutzmaske ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und nicht wiederverwendbar.



Nicht steril.

Wartung/ Desinfektion:

Eine Reinigung, Wartung oder Desinfektion ist nicht nötig. Maske nach einmaligem Gebrauch entsorgen (maximal ein Arbeitstag).

Lagerung/ Aufbewahrung /Transport / Entsorgung:

Bewahren Sie unbenutzte Atemschutzmasken in der Originalverpackung oder in einer geschlossenen Box auf. Der Transport darf nur in der Originalverpackung erfolgen.

Einschränkungen:

- Benutzen Sie die Atemschutzmaske nicht, oder bleiben Sie nicht in dem verschmutzten Bereich,
- wenn der Sauerstoffgehalt geringer als 19,5% ist;
 - wenn die Art der Verschmutzung oder ihre Konzentration unbekannt oder lebensbedrohlich ist;
 - wenn die Konzentrationen der Verschmutzung den zulässigen Höchstwert überschreitet;
 - wenn Gase oder Dämpfe vorhanden sind.

Warnhinweise:

- Nicht zu benutzen bei Feuerwehreinsätzen. Die Atemschutzmasken versorgen nicht mit Sauerstoff.
- Nicht zu benutzen in sauerstoffarmen Bereichen wie z.B. in Tanks oder in anderen schlecht belüfteten Bereichen.
- Nicht zu benutzen in explosiver Atmosphäre. Nur von geschultem und qualifiziertem Personal zu verwenden.
- Nicht benutzen, wenn der Verpackung oder die Maske selbst beschädigt ist.
- Nicht zu benutzen, wenn die Maske verschmutzt ist.
- Die Maske darf nicht geändert oder repariert werden.

Model: KND-003 EN149:2001+A1:2009 CE 2163

Inhalt: FFP2 NR Atemschutzmasken

Herstellungsdatum: auf der Verpackung

Ablaufdatum: auf der Verpackung

Hersteller: Guangdong Connaught Medical Technology Co. Ltd.

First to third floors, East Side of Building 1, No. 2 Road, Nandong Pu Industrial Zone, Liusha, Puning,
Guangdong Province, PR China

Notified Body: Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (NB2163)

Inverkehrbringer: Allflash Produktions + Vertriebs GmbH, Lettenbachstraße 1, D-86874 Mattsies